

# Si el V-Go® causa irritación en la piel o deja residuos...



## Irritación en la piel

Si la piel alrededor del V-Go tiene un aspecto enrojecido y está sensible al tacto, es probable que esté irritada. Existen numerosos productos disponibles que protegen la piel y ayudan a evitar la irritación o tratan los problemas de sensibilidad.

La piel puede irritarse por la almohadilla adhesiva del V-Go o por la manera en que se coloca el V-Go en la piel.



Su médico puede recomendarle productos con prescripción en su caso específico.



Se pueden presentar infecciones en el sitio de aplicación. Si observa enrojecimiento, irritación o inflamación alrededor del V-Go (específicamente en el extremo más cercano a la aguja), reemplace inmediatamente el V-Go por uno nuevo y aplique en un lugar diferente del cuerpo. **Contacte a su médico o profesional de la salud para que le indique cuál es la mejor forma de tratar la infección y la irritación**, especialmente si el lugar inflamado tiene un tamaño mayor que una moneda de diez centavos.

## Productos que ayudan a evitar la irritación

- Película protectora no irritante Cavilon™
- IV Prep™
- Protector cutáneo Tegaderm™



## Residuos de adhesivo

- Trate de usar un producto de protección cutánea antes de colocar el V-Go.
- Verifique que retiró cualquier residuo antes de colocar un nuevo V-Go.

## Productos que ayudan a eliminar los residuos de adhesivo:

- Removedor de adhesivo Detachol®
- Remove™ (Smith & Nephew)
- Uni-Solve™
- Aceite (bebé, oliva, coco)
- Vaselina (Vaseline®)



Antes de aplicar el V-Go, limpie la superficie de la piel con alcohol o un limpiador antiséptico cutáneo.



Si aún tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con su médico o con atención al cliente V-Go Cares al 866-881-1209.



Para mayor información, visite [www.go-vgo.com](http://www.go-vgo.com)

**Los productos mencionados son solo sugerencias.** Debe consultar a su médico antes de utilizar cualquiera de estos productos. La mayoría están disponibles en tiendas en línea y farmacias locales. MannKind Corporation no ha probado ninguno de estos productos en relación con el uso de V-Go.

**mannkind**

V-GO, V-GO WEARABLE INSULIN DELIVERY y el logotipo de MANNKIND son marcas comerciales registradas de MannKind Corporation.

US-VGO-0056 12/2022 © 2022 MannKind Corporation

Todas las marcas comerciales registradas son propiedad de sus dueños respectivos.

**Información importante de seguridad:** Si se necesitan ajustes o modificaciones frecuentes al flujo basal de insulina en un período de 24 horas, o si la cantidad de insulina usada en las comidas requiere ajustes inferiores a incrementos de 2 unidades, el uso del dispositivo de administración de insulina portátil V-Go puede producir hipoglucemia. Pueden presentarse las siguientes condiciones con la administración de insulina con V-Go: hipoglucemia (glucemia baja) o hiperglucemia (glucemia alta). Otras reacciones adversas asociadas con el uso de V-Go incluyen irritación cutánea por la almohadilla adhesiva o infecciones cutáneas en el lugar de la infusión. V-Go no es seguro para las resonancias magnéticas (RM) y se debe retirar antes de cualquier estudio de ese tipo o de una radiografía o tomografía axial computarizada (TAC).


# Si el V-Go® no se adhiere...




## Lugares donde puede colocar el V-Go

La adherencia del V-Go depende de una correcta aplicación.

- Seleccione un lugar que permanezca plano cuando esté sentado, de pie o acostado.
- Asegúrese de poder ver el indicador gris en la ventana de visualización y de alcanzar todos los botones.

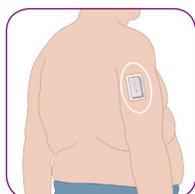

Parte posterior del brazo

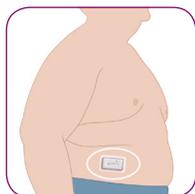

Abdomen o espalda (sobre la cintura)



Muslo




Cambie el lugar de aplicación todos los días.



## Lugares donde no debe colocar el V-Go

- En un pliegue cutáneo, músculo o hueso.
- En superficies de piel con exceso de tejido cicatricial, humedad, sudor o grasa.
- En un radio de 1 pulgada (2,5 cm) del ombligo.
- En zonas con exceso de vellos.
- En zonas que interfieren con la ropa o en zonas de estiramiento.

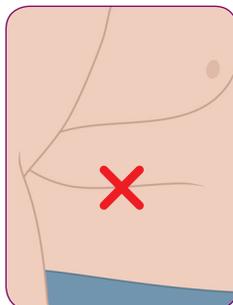

## Prepare el sitio de aplicación

- Aplique alcohol o un antiséptico cutáneo para limpiar la superficie de la piel.
- Evite usar lociones o cremas en la zona.
- Use productos de protección cutánea antes de colocar el V-Go.



Si es necesario, afeite el vello en el lugar de aplicación para obtener una superficie lisa.



## Aplicación del V-Go

- Sujete el V-Go y retire el revestimiento. Tenga cuidado para no tocar el lado pegajoso del adhesivo.
- Presione durante 10 segundos y deslice el dedo por los bordes para fijarlo en la piel.



Seleccione el lugar de aplicación mientras esté sentado; colóquese el V-Go de pie.



## Productos que ayudan mantener puesto el V-Go

Estos son algunos productos que los pacientes de V-Go y sus médicos han usado y pueden ser útiles en su caso.

- Película protectora no irritante Cavilon™
- Toallitas protectoras Covidien Webcol™
- Toallitas o protector líquido adhesivo Skin-Tac™
- Protector cutáneo Tegaderm™



El antitranspirante en aerosol reduce la sudoración y mejora la adherencia del V-Go.



**Los productos mencionados son solo sugerencias.** Debe consultar a su médico antes de utilizar cualquiera de estos productos. La mayoría están disponibles en tiendas en línea y farmacias locales. MannKind Corporation no ha probado ninguno de estos productos en relación con el uso de V-Go.